

## 耳挂式充电助听器 物件清单

- ① 充电盒
- ② 助听器主体(左耳、右耳 各1)
- ③ 耳塞(大、中、小、极小 各2)
- ④ 适配器
- ⑤ 1.5V AA (UM-3) 硷性电池1颗
- ⑥ 清洁刷
- ⑦ 调音棒 2支



## 产品规格

产品名称: 耳挂式充电助听器  
 产品功能: 帮助听力受损的人可以过正常的有声生活  
 标准频率: 2500Hz  
 最大音量输出标准:  $50 \pm 5\text{dB}$   
 电池型式: 内建专用充电电池1颗  
 可充放次数: 300次以上(数值根据使用的音量大小而有所差异)  
 产品使用: 每充电一次约可连续使用12~16小时(满电的状况)  
 产品使用的环境温度及湿度:  $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ , 30% ~ 85% RH  
 产品尺寸: 【耳机主体】约36 (L) x 15 (W) x 10 (H) mm  
 【充电盒】“充电盒”约96 (L) x 66 (W) x 22 (H) mm  
 产品重量: 【耳机主体】6.0g (含充电电池) / 【充电盒】62.5g  
 产品材质: 【耳机主体】【充电盒】【适配器】ABS / 【耳塞】矽胶

## 各部功能名称


### ■ 充电盒



### ■ 助听器本体




## 如何配戴助听器

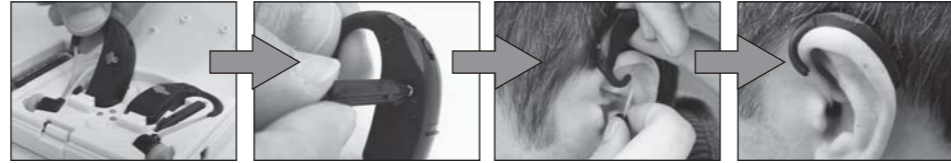

将助听器自充电盒取出  
 开启电源, 依个人需求调整适合音量  
 将耳塞放入耳朵内  
 依照舒适度调整配戴位置及选用尺寸合适的耳塞

## 如何调整音量

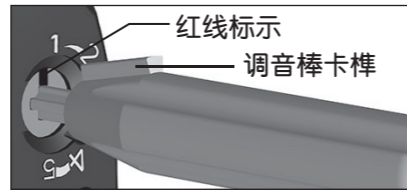

※请将调音棒卡榫对准音量调节孔的红线标示正确插入, 以便顺利调整适合音量。  
 ※请注意: 过大的音量可能造成听力进一步损害。

音量1	音量2	音量3	音量4	音量5
音量增益 < 20dB	音量增益 < 40dB	音量增益 < 50dB	音量增益 < 55dB	音量增益 ≤ 55dB
适合听损小於 40分贝听障	适合听损小於 60分贝听障	适合听损小於 80分贝听障	适合听损小於 90分贝听障	适合听损小於 100分贝听障

## 如何充电

※注意: 助听器本体的开关要处於“开”的状态才能充电。  
 ※充电8小时以上时, 无论充电指示灯①②是否熄灭, 助听器都已将近充电完成。除非长时间不使用, 才需将助听器开关切换到“关”的位置。

### ■ 适配器充电

1. 先将适配器接上充电盒, 并插上家用插座, 再将助听器电源开启後置入充电槽充电。



2. 按压充电状态测试钮, 观察充电指示灯①②与电源指示灯③是否为“绿灯”, 即表示正常供电中。

### ■ 电池充电

1. 将硷性电池放到电池座中, 再将助听器电源开启後置入充电槽充电。



2. 按压充电状态测试钮, 观察充电指示灯①②与电源指示灯③是否为“绿灯”, 即表示正常供电中。

## 按下充电状态测试钮指示灯状态显示



※未装置电池或使用适配器充电时, 此时按压测试钮电源指示灯及充电指示灯皆熄灭。

充电指示灯①②	亮绿灯	正常充电中
	熄灭	充电完成或助听器未开启电源或主体安装错误
电源指示灯③	亮绿灯	硷性电池或适配器电力供应正常
	亮红灯 熄灭	电力供应异常, 立即换新硷性电池或使用适配器

## ⚠ 重要须知

- 为了延长充电电池的使用寿命, 长时间不使用时, 请先将助听器电池充饱後再关闭电源, 避免电力自然损耗。
- 使用前先以棉花棒清洁您的耳垢。如果耳垢阻塞了耳塞孔, 将会影响收音品质。
- 本产品内建充电电池, 在正常适当的情况下使用时, 此充电电池能充放电的次数高达300次以上。
- 根据充电电池的特性, 在电池电量不足时, 音量会较平时微弱: 此现象并非功能损坏, 此时您只要利用适配器或硷性电池进行充电即可。
- 请勿让婴儿或没有自主能力的人使用此产品。
- 请根据此说明书来操作及保存此产品。
- 在下列情况请勿使用助听器: 使用手机时、睡觉、洗澡、洗头、洗脸及游泳等会碰到水的情况, 或是剧烈的运动时。

## 产品送修前的注意事项

- 将助听器送回维修前, 请依以下项目自行检视, 若未改善, 请联络包修服务中心。
- (1) 检查电源是否打开。
  - (2) 耳垢是否阻塞了耳塞: 请用配备中的清洁耳刷来清理耳塞。
  - (3) 电池的电力是否已耗尽: 请更换新的电池来充电或使用适配器充电。
  - (4) 建议可定期到医院检查听力, 是否听力有变差。

## 免责声明

此助听器为公益免费赠送品, 听觉正常的人绝对不可使用助听器, 否则遗害终身。本赠送品不保证适用於每位人士, 使用前请先徵询专业医生或专业医疗机构之专业意见, 使用後如果感觉不适, 应该立即停止使用, 并向专业医生或专业医疗机构寻求专业指导, 否则後果自负, 监护人要时刻观察年幼使用者的反应, 时刻检查音量是否被改变, 发现有异常, 应该立即送医。赠送者对使用者的不适、一切後果、不负任何责任, 特此声明。

## 包修服务

1. 请至天籁列车网页 [www.abctissue899.com](http://www.abctissue899.com) 填写「包修资格登录表」
2. 收到助听器後, 拍摄使用者配戴照片并电邮至: [abc2233@abctissue.com](mailto:abc2233@abctissue.com) (个人及代人申请) [abc8899@abctissue.com](mailto:abc8899@abctissue.com) (团体申请)
3. 包修服务电邮: [abc hearingservice@gmail.com](mailto:abc hearingservice@gmail.com)