

耳挂式充电助听器 物件清单

- ① 充电盒
- ② 助听器主体(左耳、右耳 各1)
- ③ 耳塞(大、中、小、极小 各2)
- ④ 适配器
- ⑤ 1.5V AA (UM-3) 硷性电池1颗
- ⑥ 清洁刷



产品规格

产品名称：耳挂式充电助听器
 产品功能：帮助听力受损的人可以过正常的有声生活
 标准频率：2500Hz
 最大音量输出标准：50±5dB
 电池型式：内建专用充电电池1颗
 可充放次数：300次以上(数值根据使用的音量大小而有所差异)
 产品使用：每充电一次约可连续使用12~16小时(满电的状况)
 产品使用的环境温度及湿度：+10℃ ~ +40℃, 30% ~ 85% RH
 产品尺寸：【耳机主体】约36 (L) x 15 (W) x 10 (H) mm
 【充电盒】“充电盒”约96 (L) x 66 (W) x 22 (H) mm
 产品重量：【耳机主体】6.0g (含充电电池) / 【充电盒】62.5g
 产品材质：【耳机主体】【充电盒】【适配器】ABS / 【耳塞】矽胶

各部功能名称

■ 充电盒



■ 助听器本体


收音麦克风：将外界的声音由此收入本体

电源开关(开/关)

- 开：全频放大
 ※注意：助听器自充电盒拿出後，约有10秒的延迟(此时助听器为无声状态)，以避免置入耳朵会产生嗡嗡地回授音。
- 关：助听器电源关闭




如何配戴助听器

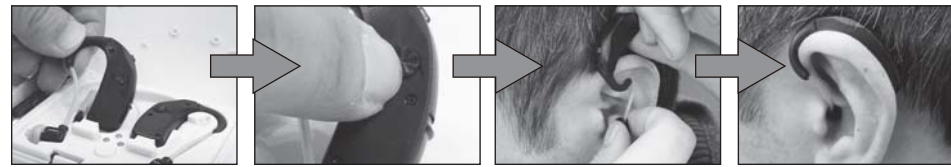

将助听器自充电盒取出
 开启电源，依个人需求调整适合音量
 将耳塞放入耳朵内
 依照舒适度调整配戴位置及选用尺寸合适的耳塞

如何调整音量

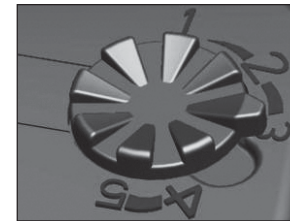

※旋转音量调节钮调整音量，音量标示1-5，数字1为最小声，数字5为最大声，请依照个人需求调整最适合的音量。

※请注意：过大的音量可能造成听力进一步损害。

音量1	音量2	音量3	音量4	音量5
音量增益 < 20dB	音量增益 < 40dB	音量增益 < 50dB	音量增益 < 55dB	音量增益 ≤ 55dB
适合听损小於 40分贝听障	适合听损小於 60分贝听障	适合听损小於 80分贝听障	适合听损小於 90分贝听障	适合听损小於 100分贝听障

如何充电

※注意：助听器本体的开关要处於“开”的状态才能充电。

※充电8小时以上时，无论充电指示灯①②是否熄灭，助听器都已将近充电完成。除非长时间不使用，才需将助听器开关切换到“关”的位置。

■ 适配器充电

1. 先将适配器接上充电盒，并插上家用插座，再将助听器电源开启後置入充电槽充电。



2. 按压充电状态测试钮，观察充电指示灯①②与电源指示灯③是否为“绿灯”，即表示正常供电中。

充电指示灯① 充电指示灯② 电源指示灯③

■ 电池充电

1. 将硷性电池放到电池座中，再将助听器电源开启後置入充电槽充电。

2. 按压充电状态测试钮，观察充电指示灯①②与电源指示灯③是否为“绿灯”，即表示正常供电中。



按下充电状态测试钮指示灯状态显示



※未装置电池或使用适配器充电时，此时按压测试钮电源指示灯及充电指示灯皆熄灭。

充电指示灯①②	亮绿灯	正常充电中
	熄灭	充电完成或助听器未开启电源或主体安装错误
电源指示灯③	亮绿灯	硷性电池或适配器电力供应正常
	亮红灯 熄灭	电力供应异常，立即换新硷性电池或使用适配器

⚠ 重要须知

- 为了延长充电电池的使用寿命，长时间不使用时，请先将助听器电池充饱後再关闭电源，避免电力自然损耗。
- 使用前先以棉花棒清洁您的耳垢。如果耳垢阻塞了耳塞孔，将会影响收音品质。
- 本产品内建充电电池，在正常适当的情况下使用时，此充电电池能充放电的次数高达300次以上。
- 根据充电电池的特性，在电池电量不足时，音量会较平时微弱：此现象并非功能损坏，此时您只要利用适配器或硷性电池进行充电即可。
- 请勿让婴儿或没有自主能力的人使用此产品。
- 请根据此说明书来操作及保存此产品。
- 在下列情况请勿使用助听器：使用手机时、睡觉、洗澡、洗头、洗脸及游泳等会碰到水的情况，或是剧烈的运动时。

产品送修前的注意事项

- 将助听器送回维修前，请依以下项目自行检视，若未改善，请联络包修服务中心。
- (1) 检查电源是否打开。
 - (2) 耳垢是否阻塞了耳塞：请用配备中的清洁耳刷来清理耳塞。
 - (3) 电池的电力是否已耗尽：请更换新的电池来充电或使用适配器充电。
 - (4) 建议可定期到医院检查听力，是否听力有变差。

免责声明

此助听器为公益免费赠送品，听觉正常的人绝对不可使用助听器，否则遗害终身。本赠送品不保证适用于每位人士，使用前请先徵询专业医生或专业医疗机构之专业意见，使用後如果感觉不适，应该立即停止使用，并向专业医生或专业医疗机构寻求专业指导，否则後果自负，监护人要时刻观察年幼使用者的反应，时刻检查音量是否被改变，发现有异常，应该立即送医。赠送者对使用者的不适、一切後果、不负任何责任，特此声明。

包修服务

1. 请至天籁列车网页www.abctissue899.com填写「包修资格登录表」
2. 收到助听器後，拍摄使用者配戴照片并电邮至：
 abc2233@abctissue.com (个人及代人申请)
 abc8899@abctissue.com (团体申请)
3. 包修服务电邮：abc hearingservice@gmail.com